

Neues Mitglied in der Accu-Chek Datenmanagement Familie!

Ab sofort können Sie Ihre Diabetesdaten mithilfe der neuen Accu-Chek 360° Software verwalten und analysieren. Flexibel und umfassend. Für einen vollständigen Überblick über Ihren Therapieverlauf.

In unseren früheren Ausgaben haben wir bereits über das mobil einsetzbare, clevere Auslesegerät **Accu-Chek Smart Pix** berichtet, mithilfe dessen Sie Ihre Daten grafisch dargestellt auswerten können. Nun wurde das Accu-Chek Daten-Management Portfolio um ein neues Mitglied erweitert: Accu-Chek 360° Datenmanagement System heißt die neue Software, die Ihnen noch mehr Überblick über Ihren Therapieverlauf ermöglicht.

Die Accu-Chek 360° Software liefert ein umfassendes und flexibles Diabetes-Datenmanagement, das zusätzlich zu den aktuellen Blutzuckerwerten auch

Insulinwerte und andere wichtige Einflussfaktoren, wie Kohlenhydrateinheiten oder Sport dokumentiert. So hilft Accu-Chek 360° dabei, leichter den Zusammenhang zwischen Blutzucker-Messwerten und Ihrem persönlichen Lebensstil zu erkennen. Gemeinsam mit dem behandelnden Arzt kann daraufhin die bestmögliche, individuell abgestimmte Behandlungsstrategie entwickelt werden

Ganz persönliche Dokumentation

Die Accu-Chek 360° Software lädt Werte aus allen Accu-Chek Blutzuckermesssystemen und Accu-Chek Insulinpumpen zuverlässig und unkompliziert auf

den Computer herunter. Zusätzlich kann man wichtige Einflussfaktoren wie Bewegung, BEs oder Kohlenhydrateaufnahme eintragen. Alle Daten werden dann in einem elektronischen Diabetes-tagebuch verwaltet und ausgewertet. So wird das persönliche Diabetes-Datenmanagement noch einfacher. Übersichtliche Grafiken und statistische Auswertungen zeigen den genauen Verlauf der Blutzuckerwerte in Tages- und Langzeitprofilen an; man erkennt schnell, welche Faktoren den Blutzucker beeinflusst haben. Per Knopfdruck erstellt Accu-Chek 360° eine Übersichtsseite mit allen relevanten Informationen. Zudem lassen sich viele Funktionen einfach ein- und ausblenden, so kann jeder Anwender sein persönliches Tages- und Langzeitprofil erstellen.

Direkter Draht zum Arzt

Auch für die Arztpraxis und Schulungstellen gibt es die Accu-Chek 360° Software. So kann der behandelnde Arzt noch zusätzlich von ihm erhobene Daten wie zum Beispiel das Gewicht, Blutdruckwerte oder Teilnahme an Schulungen ergänzen und erhält eine gute Grundlage für die Therapieführung. Da das System über E-Mail und Faxanbindung verfügt, lassen sich die aktuellen Daten von zu Hause aus schnell an den





Arzt übermitteln. Und wenn der PC der Arztpraxis über eine Infrarotschnittstelle verfügt, können die Daten direkt aus den Accu-Chek Blutzuckermessgeräten oder Accu-Chek Insulinpumpen in der Schulungsstelle oder am Empfang beim Arzt ausgelesen werden.

Für jeden geeignet

Accu-Chek 360° lässt sich intuitiv bedienen und flexibel einstellen. Die Software kann jeder nutzen, der zum Beispiel mit Accu-Chek Smart Pix bereits ein elektronisches Tagebuch führt und dessen Möglichkeiten noch erweitern möchte. Ebenso kann die Software als Ergänzung zum handschriftlichen Tagebuch eingesetzt werden. Accu-Chek 360° bietet in jedem Fall einen aussagekräftigen Überblick über Ihre Blutzucker- und Insulinwerte. Und das ist die ideale Grundlage für mehr Orientierung im Alltag und in Ihrer Therapieeinstellung.

Systemvoraussetzungen

Um die Accu-Chek 360° Software zu nutzen, brauchen Sie einen normalen IBM-kompatiblen Computer, der über ein CD-ROM Laufwerk sowie einen USB-Anschluss verfügt und mit dem Betriebssystem Windows 2000, XP oder Vista arbeitet. Festplatte: 1 GB (empfohlen: 2 GB); Arbeitsspeicher: 256 MB RAM oder mehr (empfohlen mind. 512 MB). Für die Übertragung der Blutzucker- und Insulinpumpenwerte in die Software benötigen Sie das Accu-Chek 360° USB Kabel. Accu-Chek 360° Software und das USB Auslesegerät erhalten Sie in Apotheken und im Sanitätsfachhandel (empf. Verkaufspreis: Software 19,90 EUR, Auslesegerät: 19,90 EUR).



PZN: 3393313



PZN: 3393336

Falls Sie weitere Fragen haben oder Hilfe bei der Installation benötigen, rufen Sie einfach das Accu-Chek Kunden Service Center an, Telefon: **01 277 87 355** (von Mo. – Fr. 8:00 – 17:00 Uhr) oder besuchen Sie das Internet unter www.accu-chek.at

Unser Tipp: Falls Sie Accu-Chek Smart Pix bereits zu Hause haben, benötigen Sie das 360° USB Kabel nicht zusätzlich. Das Auslesen ist mit beiden Geräten möglich.



Die Grafik zeigt mehrere Tagesprofile, die übereinandergelegt wurden. Viele Werte am Nachmittag und Abend befinden sich im Zielbereich (grün), doch morgens treten typischerweise Hyperglykämien auf.

Einführungsaktion!

Werden Sie jetzt Accu-Chek + Club-Mitglied und sichern Sie sich die neue Accu-Chek 360° Software. **Jetzt registrieren und EUR 19,90 sparen! Die ersten 100 registrierten Accu-Chek + Club Mitglieder können die neue Accu-Chek 360° Software unentgeltlich anfordern.**

Wie kann ich mich registrieren?

Um Accu-Chek + Club-Mitglied zu werden, gehen Sie auf: www.accu-chek.at

